

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

Kurzanleitung

Wichtig

- Beachten Sie bitte, dass dieser Test im Falle einer Erkrankung mit COVID-19 die entsprechende Infektion bis zu zehn Tage nach Erkrankungsbeginn beziehungsweise dem Auftreten der ersten Symptome nachweisen kann.
- Nasen-Abstrichproben von Personen unter 15 Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden. Personen über 70 Jahren sollten sich bei der Entnahme ihres Nasen-Abstrichs unterstützen lassen.
- Die Durchführung des Tests dauert ca. 5 Minuten, und die Testergebnisse müssen nach weiteren 15 Minuten abgelesen werden.
- Es ist wichtig, dass Sie diese Test-Anweisungen sorgfältig befolgen, um das richtige Ergebnis zu erhalten.
- Die Testkassette und die Pufferlösung müssen vor Beginn des Tests Raumtemperatur (15–30°C) haben.
- Bitte waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände sorgfältig vor und nach der Durchführung des Tests.
- Bitte treffen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie andere Personen testen (z. B. Gesichtsmaske, Handschuhe).


Wenn Sie Fragen zur Verwendung des Tests oder zum Ablesen der Ergebnisse haben, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
Telefon: 0800-40 40 633 (kostenfrei)
Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

Erste Schritte

Inhalt des Selbsttest-Sets

1. Sterile Tupfer (20x)
2. Flaschen mit Pufferlösung (2x)
3. Testkassetten (20x)
4. Teströhrchen und Kappen (20x)
5. Arbeitsstation (1x)
6. Gebrauchsanweisung (1x)
7. Kurzanleitung (1x)


Weitere erforderliche Gegenstände (nicht im Selbsttest-Set enthalten): Uhr, Timer oder Stoppuhr; Plastiktüte für Abfall

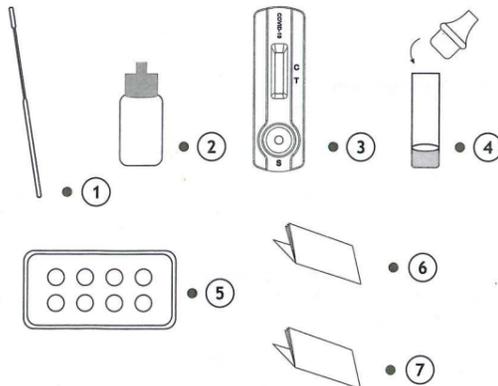

Test starten




Schritt 1
Setzen Sie das Teströhrchen in die Arbeitsstation ein.

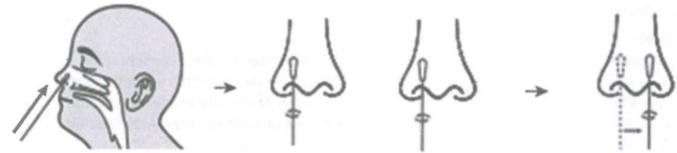

Schritt 5
Rollen Sie den Tupfer mindestens 5-mal gegen die Innenseiten Ihres Nasenlochs. Achten Sie auf guten Kontakt zwischen dem Tupfer und der Innenseite Ihres Nasenlochs.

Schritt 2
Geben Sie 10 Tropfen der Pufferlösung in das Röhrchen.


Schritt 6
Entfernen Sie den Tupfer und führen Sie ihn in Ihr rechtes Nasenloch ein. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

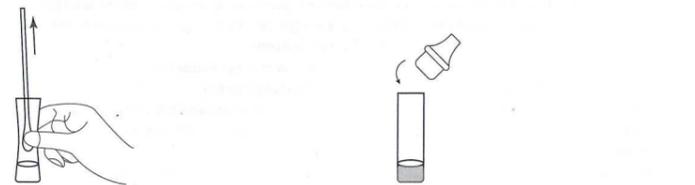


Schritt 11
Entfernen Sie den Tupfer und entsorgen Sie ihn in einem Plastikbeutel.

Schritt 16
Lesen Sie Ihre Ergebnisse ab. Es gibt drei mögliche Ergebnisse.


Positives Testergebnis

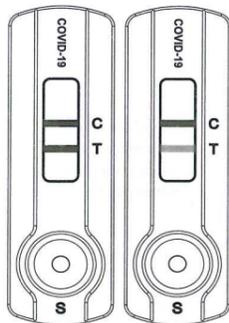


Wenn die Testkassette wie eines der links dargestellten positiven Ergebnisfenster aussieht, haben Sie eine aktuelle COVID-19-Infektion. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr örtliches Gesundheitsamt und halten Sie sich an die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolierung. Eine erneute Testung mit anderen Testmethoden, wie z. B. einem PCR-Test, kann erforderlich sein.

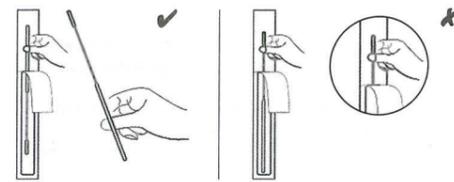

Schritt 3
Öffnen Sie die Tupferpackung an der angegebenen Stelle. Ziehen Sie den Tupfer an seinem Kunststoffende aus der Verpackung. Berühren Sie nicht die saugfähige Tupferspitze.

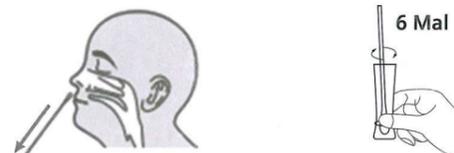


Schritt 7
Entfernen Sie den Tupfer aus Ihrem Nasenloch und führen Sie den Tupfer in das vorbereitete Röhrchen in der Arbeitsstation ein.

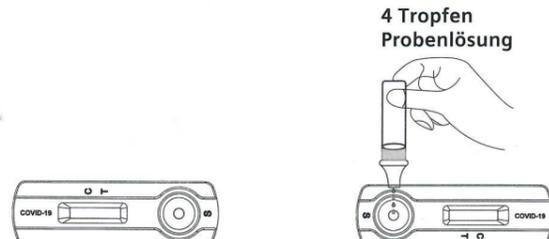

Schritt 13
Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel und legen Sie diese auf eine flache, saubere Fläche.

Negatives Testergebnis

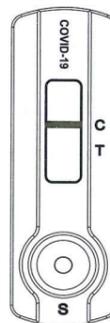

Wenn die Testkassette wie das links abgebildete negative Ergebnisfenster aussieht, konnte keine COVID-19-Infektion nachgewiesen werden. Wiederholen Sie im Verdachtsfall den Test nach 1–2 Tagen, da das Virus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann. Trotz eines negativen Testergebnisses müssen Sie weiterhin alle geltenden Regeln bezüglich Kontakt mit anderen und Schutzmaßnahmen einhalten.



Schritt 4
Führen Sie die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Stellen Sie sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in Ihrem Nasenloch befindet (2–4 cm tief). Führen Sie den Tupfer nicht weiter ein, wenn Sie einen Widerstand spüren.



Schritt 9
Starten Sie den Timer. Lassen Sie den Tupfer für 1 Minute im Röhrchen.




Schritt 10
Drücken Sie das Röhrchen mehrmals von außen zusammen. Versuchen Sie, so viel Probenlösung wie möglich aus dem Tupfer zu lösen.



Schritt 15
Starten Sie den Timer und warten Sie 15 Minuten. Es ist wichtig, die Ergebnisse nach 15 Minuten abzulesen.

Ungültiges Testergebnis

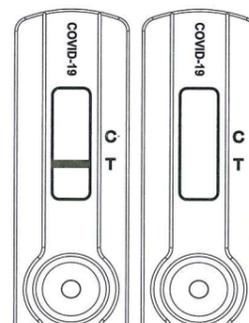

Wenn Ihr Testergebnis anders aussieht, d. h. es ist keine Linie sichtbar oder nur eine Linie bei T, ist das Ergebnis ungültig. Dies kann ein Ergebnis der Testdurchführung sein, und der Test sollte wiederholt werden. Bei weiterhin ungültigen Testergebnissen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder ein COVID-Testzentrum.

Revisionsdatum: 2021-02-26
MRK210003
Rev. B

Veröffentlicht durch Siemens Healthcare GmbH
Gedruckt in Deutschland
© Siemens Healthcare GmbH, 2021